

«Алмадез ЭКО»

«Алмадез ЭКО» (концентрат) – многокомпонентное дезинфицирующее средство с синергизмом действующих веществ, не требующее ротации.

Обладает высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (кроме туберкулеза), в том числе бактерий группы кишечной палочки, стафилококков, стрептококков и других возбудителей внутрибольничных инфекций), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон (дерматофитий), плесневых грибов (тестировано на тест-штамме *Aspergillus niger*).

Предназначено:

А. Для дезинфекции и очистки объектов внутрибольничной среды во всех подразделениях МО и ЛПО любого профиля, включая роддома, отделения неонатологии, эндоскопии, ЭКО и др. при проведении профилактической и очаговой дезинфекции:

- всех видов поверхностей помещений, мебели и оборудования (в т.ч. кувезы новорожденных, аппараты ИВЛ, ИК, наркозно-дыхательные и др.) при проведении текущих и генеральных уборок, текущей и заключительной очаговой дезинфекции;

- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой медицинских инструментов, включая стоматологические инструменты и материалы, жесткие и гибкие эндоскопы;

- для обеззараживания медицинских отходов классов А, Б, включая жидкие биологические выделения, воздуха.

Б. Для профилактической и очаговой дезинфекции и очистки на объектах всех отраслей народного хозяйства, включая учреждения - детские дошкольные, образовательные, бьюти-индустрии, аквапарки, бассейны, сауны, объекты ГО, Вооруженных сил, МЧС, в т.ч. все виды транспорта (общественный, воздушный, водный, железнодорожный, санитарный, транспорт для перевозки пищевых продуктов и др.).

Состав:

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 3,5%, молочная кислота - 1%

ЧАС (дидецилдиметиламмоний хлорид, АДБАХ) - 6,0 %

Преимущества:

- Обладает высокими моющими свойствами, нейтрализует запахи;

- Безопасно- относится к 4 классу токсичности малоопасных веществ, применяется в присутствии людей без использования средств индивидуальной защиты;

- Не требует смывания с поверхностей после обработки;

- Не портит обрабатываемые объекты и инструменты.

Срок годности средства: 7 лет; рабочего раствора: 45 суток.

Характеристики:

Фасовка:

Флакон 1л, канистра 5л

Контроль концентрации в рабочих растворах - тест-полоски 100 шт/уп.

Хранение: от -40°C до +40°C.

Транспортировка: не требует теплых вагонов. Сохраняет свои свойства после заморозания и размораживания.

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА

Объект обработки	Микробиологические режимы	Концентрация %	Время экспозиции	Кол-во рабочего раствора (л)
Дезинфекция поверхностей помещений, жесткой мебели, оборудования	Бактериальных инфекций (без туберкулеза)	0,3	90 мин	333,3
		0,5	60 мин	200
		0,75	30 мин	133
		1,0	15 мин	100
		2,0	5 мин	50
	Вирусных инфекций	1,5	90 мин	66,6
		2,0	60 мин	50
		3,0	30 мин	33
		4,0	15 мин	25
	Кандидозах	0,5	90 мин	200
		1,0	60 мин	100
		2,0	30 мин	50
		3,0	15 мин	33,3
	Дерматофитий	1,5	90 мин	66,6
		2,0	60 мин	50
3,0		30 мин	33,3	
4,0		15 мин	25	
Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой медицинских изделий, включая стоматологические, жесткие и гибкие эндоскопы	при инфекциях бактериальной без туберкулеза), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии ручным способом	2,0	60 мин	50
		3,0	30 мин	33,3
		4,0	15 мин	25

АЛМАДЕЗ-ЭКО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА

1. РЕЖИМ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ (КРОМЕ ТУБЕРКУЛЕЗА)

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки/р асход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, в т.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов;	0,3% - 90 мин	3	997	Протирание /100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	333.3
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственной и натуральной кожи, мягкая мебель	0,3% - 90 мин	3	997	Протирание /100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	333.3
Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,5% - 60 мин	5	995	Протирание, погружение	200

Предметы ухода за больными, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью и пр.)	1% - 90 мин	10	990	Протирание, погружение	100
Игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	0,5% - 60 мин	5	995	Протирание, погружение	200
Белье, не загрязненное выделениями	0,3%-90 мин	3	997	Погружение	333.3
Белье, загрязненное выделениями	1% - 90 мин	10	990	Погружение	100
Посуда без остатков пищи	0,5% -60 мин	5	995	Погружение	200
Посуда с остатками пищи, посуда лабораторная и аптечная; предметы для мытья посуды	1% -90 мин	10	990	Погружение	100
Уборочный материал, инвентарь	1% -90 мин	10	990	Протирание, погружение	100
Санитарно-техническое оборудование	0,3% - 90 мин	3	997	Протирание	333.3

2. РЕЖИМ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПОЛИОВИРУС, ГЕПАТИТЫ А, Б, С)

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки/расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, в т.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	1,5% - 90 мин	15	985	Протирание / 100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	66.6
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственной и натуральной кожи, мягкая мебель	1,5% - 90 мин	15	985	Протирание / 100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	66.6
Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	1,5% - 90 мин	15	985	Протирание, погружение	66.6
Предметы ухода за больными	4% - 90 мин	40	960	Протирание, погружение	25
Игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	2% - 60 мин	20	980	Протирание, погружение	50
Белье, не загрязненное выделениями	3%-60 мин	30	970	Замачивание	33.3
Белье, загрязненное выделениями	4%-90 мин	40	960	Замачивание	25
Посуда без остатков пищи,	2% -60 мин	20	980	Погружение	50
Посуда с остатками пищи, предметы для мытья посуды посуда лабораторная и аптечная	4% -90 мин	40	960	Погружение	25
Уборочный материал, инвентарь	3%-90 мин	30	970	Протирание, погружение	33.3
Санитарно-техническое оборудование	1,5% - 90 мин	15	985	Протирание	66.6

3. ГРИБКОВЫХ ИНФЕКЦИЙ (КАНДИДОЗЫ, ДЕРМАТОФИТИИ)

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки /расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, в т.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов;	0,5% - 90 мин - кандидозы	5	995	Протирание / 100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	200
	1,5%-90 мин дерматофитии	15	985		66.6
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственной и натуральной кожи, мягкая мебель	1% - 60 мин - кандидозы	10	990	Протирание / 100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	100
	2%-120 мин дерматофитии	20	980		50
Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,5% - 90 мин - кандидозы	5	995	Протирание, погружение	200
Предметы ухода за больными	3% - 90 мин кандидозы, дерматофитии	30	970	Протирание, погружение	33.3
Игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	1% - 60 мин - кандидозы	10	990	Протирание, погружение	100
Белье, не загрязненное выделениями	0,5%-90 мин- кандидозы	5	995	Замачивание	200
	1,5%-90 мин дерматофитии	15	985		66.6
Белье, загрязненное выделениями	3%-90 мин кандидозы и дерматофитии	30	970	Замачивание	33.3
Посуда без остатков пищи	2% -30 мин кандидозы 2% - 60 мин- дерматофитии	20	980	Погружение	50
Посуда с остатками пищи, посуда лабораторная и аптечная; предметы для мытья посуды	3% - 90 мин - кандидозы и дерматофитии	30	970	Погружение	33.3
Уборочный материал, инвентарь	3% - 90 мин - кандидозы и дерматофитии	30	970	Протирание, погружение	33.3
Санитарно-техническое оборудование	1%-60 мин- кандидозы	10	990	Протирание	100
	1,5% - 90 мин- дерматофитии	15	985		66.6
Резиновые, пропиленовые коврики, деревянные решетки	3%-90 мин дерматофитии	30	970	Протирание, погружение	33.3
Обувь из кожи, резины, ткани, дермантина и др. синтетических материалов	3%-90 мин кандидозы и дерматофитии	30	970	Протирание, погружение	33.3

**4. РЕЖИМ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ПРИ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ (КРОМЕ ТУБЕРКУЛЕЗА), ВИРУСНЫХ И ГРИБКОВЫХ
ИНФЕКЦИЙ**

Вид отходов	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки /расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Ватные или марлевые тампоны, марля, бинты, одноразовая медицинская одежда, использованные маски, бахилы	3%-120 мин	30	970	Погружение и замачивание	33.3
Медицинские изделия однократного применения	3% - 60 мин	30	970	Погружение и замачивание	33.3
Контейнеры для сбора инфицированных медицинских отходов класса Б	4% - 90 мин	40	960	Протирание, орошение	25
Остатки пищи	4% - 90 мин	40	960	Смешивание с рабочим раствором в соотношении 1:1	25

**5. РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ, СОВМЕЩЕННОЙ С ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ
ОЧИСТКОЙ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ЭНДОСКОПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ БАКТЕРИАЛЬНОЙ (КРОМЕ
ТУБЕРКУЛЕЗА), ВИРУСНОЙ, ГРИБКОВОЙ (КАНДИДОЗЫ, ДЕРМАТОФИТИИ),
ЭТИОЛОГИИ РУЧНЫМ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
Температура рабочего раствора не менее 18 С°**

Вид ИМН	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Изделия простой конфигурации из металлов и стекла Изделия из пластика, резины, шлифовальные боры и алмазные диски изделия	2% - 60 мин * 2%-30 мин **	20	980	Погружение	50
Эндоскопы, стоматологические материалы (оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы), с замковыми частями, имеющие каналы и полости, зеркала с амальгамой, инструменты к эндоскопам;	3% - 60 мин *	30	970		33,3
	2%-30 мин **	20	980	Погружение	50

*Ручной способ обработки

** Механизированный способ обработки в УЗ установках любого типа